


Lubristil[®] LIPID

Solución oftálmica estéril con hialuronato sódico, levocarnitina y aceite de ricino para una protección extra

HIALURONATO SÓDICO 0,4%

INDICADO TAMBIÉN COMO
GEL PARA LA NOCHE

10ml
SIN CONSERVANTES
MULTIDOSIS

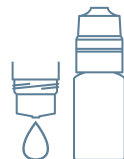

Composición: Hialuronato sódico, L-carnitina, cloruro de zinc, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, cloruro de sodio, aceite de ricino virgen, Tween 80, agua.

¿CÓMO SE PRESENTA LUBRISTIL LIPID?

Lubristil LIPID es una solución oftálmica estéril sin conservantes en un envase de 10 ml. El envase está especialmente diseñado con un mecanismo en la punta del dispensador para que quede sellado. Este mecanismo cierra la punta del dispensador inmediatamente después de que se libere la gota evitando que salga un exceso de gotas del envase a la vez que impide entrar a bacterias potencialmente dañinas en la solución, asegurando que permanezca estéril hasta 8 semanas después de la primera apertura.

¿QUÉ ES LUBRISTIL LIPID?

Lubristil LIPID es una solución oftálmica estéril humectante sin conservantes indicada para el alivio del ojo seco e irritado de grado moderado a severo. Forma una capa protectora sobre la superficie del ojo, humectando, hidratando y restaurando la capa lipídica de la película lagrimal especialmente durante la noche. Es una solución oftálmica de alta viscosidad en forma de gel que se extiende uniformemente sobre toda la superficie ocular actuando como un "escudo" que protege el ojo de factores ambientales y reduciendo la evaporación de la lágrima por lo que permite un alivio natural de la sequedad. La adición de la protección extra permite la reparación de la capa de lipídica dañada que se produce en la superficie ocular. La formulación única de Lubristil LIPID con aceite de ricino, permite la reparación y relleno de componentes de la película lagrimal, produciendo una capa más estable y permitiendo así la protección de la superficie ocular, especialmente cuando los párpados están cerrados.

¿CUÁNDO USAR LUBRISTIL LIPID?

Lubristil LIPID está específicamente formulado para dar protección en la superficie ocular durante un largo período de tiempo, tanto de día como de noche, gracias a su composición con una alta concentración de hialuronato sódico, levocarnitina y aceite de ricino. Para una acción protectora más prolongada, debe usarse justo antes de acostarse o en momentos en los que vaya a estar un período largo con los párpados cerrados o si se despierta durante la noche. De este modo, Lubristil LIPID gracias a su formulación viscosa en forma de gel protege el ojo durante un largo período de tiempo. La alta concentración de hialuronato sódico junto con el aceite de ricino crea una película protectora estable y uniforme en la superficie ocular con los párpados cerrados, incluso durante la noche.

¿CÓMO USAR LUBRISTIL LIPID?

- Presione ligeramente el envase para instilar 1 o 2 gotas en el ojo afectado, se pueden instilar más gotas si fuera necesario.
- El vaciado gradual del envase puede requerir la necesidad de ejercer una presión mayor para permitir la salida del producto. Después de que el líquido haya alcanzado menos de la mitad del envase, es necesaria una mayor presión en el cuerpo del envase para obtener la gota. Ejercer demasiada presión causará un flujo en vez de una gota.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- El producto está destinado únicamente al uso oftálmico externo. No tragar.
- No toque el ojo con la punta del envase.
- No utilizar si el envase está deteriorado o no está perfectamente cerrado en el momento de la primera apertura.
- Debido a su viscosidad característica, justo después de la instilación, en casos raros, puede provocar visión borrosa. Es aconsejable esperar unos segundos antes de cualquier actividad que requiera una visión clara.
- Esperar al menos 10 minutos antes de instilar cualquier otro medicamento oftálmico.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en el envase.
- Deseche el envase correctamente después de usarlo.
- Debido a la falta de datos específicos sobre el uso del producto durante el embarazo o la lactancia, y del uso en niños, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar Lubristil Lipid.
- Tras la primera apertura, utilizar el producto en las siguientes 8 semanas.
- Conservar entre 2 y 25°C.
- Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
- El producto está indicado para un uso continuo inferior a 30 días. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- El producto contiene fosfatos. Se han descrito casos raros de calcificación de la córnea durante el uso de gotas para los ojos que contienen fosfatos en altas concentraciones y con córneas significativamente dañadas. En caso de daño severo en la superficie corneal (como erosión pronunciada o úlcera corneal) consulte con su oftalmólogo.
- Si lleva lentes de contacto, sáqueselas antes de ponerse el producto, y no se las vuelva a poner hasta al menos 15 minutos después.

Fecha revisión: 02/2020

 **NTC Srl**
Via Luigi Razza, 3
20124 Milán - Italia

Comercializado por:
ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.
C. Osi, 7, 08034 Barcelona - España
www.lubristil.es

 **CE 0477**

STERILE A




ANGELINI

LFHYS12900

AF-P/03